



## IONO<sub>2</sub> HOME



### 1. Комплект поставки аппарата «IONO<sub>2</sub> HOME»:

- Блок управления IONO<sub>2</sub> HOME с гофрированной трубкой (длина - 160 см.).
- Блок питания.
- Маска
- Бактериальновирусный фильтр.

## 1. Подключение аппарата к электросети:

Подключите сетевую вилку прилагаемого кабеля питания к электросети (220 В / 50-60 Гц)

Внимание! Подключайте аппарат только к розеткам с классом защиты I (с заземляющим контактом). Включите аппарат посредством выключателя вкл./выкл.

Задняя стенка блока управления IONO2 HOME.



Гнездо для подключения блока питания

Сетевой выключатель

Гнездо для подключения Бактериальновирусный фильтр.



Блок питания



Бактериальновирусный фильтр.

2. Прикрепите ингаляционную маску к гофрированной трубке / ионному генератору.

3. Наденьте ингаляционную маску.

4.



С помощью клавиш ▲ и ▼ установите время  
На дисплее отображается установленное время  
Время ингаляции 15-45 минут в день.

5.



Для запуска / отключения процедуры  
нажмите клавишу Старт «I» / Стоп «0»

Характеристики	Значение
Сетевое напряжение:	220 В (V) / 50-60 Гц (Hz)
Мощность:	10 ВА (VA)
Количество заряженных ионов кислорода O <sub>2</sub> .	1 млн. ионов /см <sup>3</sup>
Предохранители (внутри аппарата):	первый 50 мА второй 400 мА
Гофрированная трубка-шланг	длина - 160 см
Габариты, Д x Ш x В	240 x 210 x 70 мм
Масса	1 кг.

## Гарантийные условия

Гарантийный срок на поставленное Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется произвести необходимый ремонт Оборудования, устранить недостатки, заменить некачественные или вышедшие из строя узлы и агрегаты.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, когда оборудование вышло из строя в результате неправильной эксплуатации или механических повреждений, связанных с небрежным обращением, а также в некоторых других случаях, не предусмотренных в заводских положениях производителя оборудования.

## Производитель:

Weyergans High Care AG  
Gut Boisdorf 8, 52355 Düren, Germany  
Tel: +49 (0) 2421-96 78 0  
E-mail: info@weyergans.de

## Уполномоченный представитель производителя:

ИП Аракелян С.М., Эксклюзивный дистрибьютор в России.  
109029, г. Москва, Михайловский проезд, дом 3, строение 80, офис 319  
Тел. +7(985) 966-99-00, +7 (929) 677 2297  
E-mail: info@asmedtrade.com

## Контакты сервисной службой

В случае возникновения неисправностей обращайтесь в сервисную службу представителя Weyergans High Care AG.

Эксклюзивный представитель в России Weyergans High Care AG  
Тел. +7(929) 677 2297 +7(985) 966 9900:  
E-mail: info@asmedtrade.com