

**ИП АРАКЕЛЯН С.М.**  
Эксклюзивный дистрибьютор в России  
**Weyergans High Care AG, Germany**  
ИНН 772135893564  
109125 г. Москва,  
Волжский бульвар, 13-1-155  
тел. +7(985) 966-99-00  
**E-mail: [info@asmedtrade.com](mailto:info@asmedtrade.com)**  
**[www.asmedtrade.com](http://www.asmedtrade.com)**



**Entrepreneur Svetlana Arakelyan**  
**Exclusive representative in Russia**  
**Weyergans High Care AG, Germany**  
INT 772135893564  
109125 Moscow,  
Volzhskiy bvd, 13-1-155  
Tel. +7(985) 966-99-00  
**E-mail: [info@asmedtrade.com](mailto:info@asmedtrade.com)**  
**[www.asmedtrade.com](http://www.asmedtrade.com)**

**Требования к помещению  
для проведения монтажных работ и эксплуатации  
аппарата интервальной вакуумной терапии VACUMED LBNPD.**

- Минимальные размеры помещения (Д x Ш): 3 x 2,5 метра.  
следует из габаритов смонтированного аппарата с панелью управления, которая равна (Д x Ш): 2 200 x 1050 мм
- Сетевое напряжение: 230 В  $\pm 5\%$  / 50 Гц  $\pm 1\%$
- Потребляемый ток: 6 А.
- Электрическая розетка с заземлением для подключения аппарата должна располагаться на той стене, вдоль которой должен быть установлен аппарат.
- Помещение должно обеспечиваться естественным воздухообменом или иметь систему принудительной вентиляции.
- Минимальная ширина проема дверей: 900 мм.

**ТАРА**

Масса брутто:

250  $\pm 5\%$

Габариты тары (Д x Ш x В)

235 x 93 x 134 см.



**Внимание!**

**Рекомендация:**

Если параметры электрической сети вашего помещения не являются стабильными или возникают проблемы с электропитанием, непосредственно на вашем участке электросети, рекомендуем подключить аппарат через стабилизатор напряжения мощностью не менее 1500 Вт.