

SLIDE-STYLER

Официальный представитель
Weyergans High Care AG
в России ИП Аракелян С.М.
тел. +7(985) 966 9900
E-mail: info@asmedtrade.com

Аппарат
воздушно-волновой
лимфодренажной терапии



Gut Boisdorf
D-52355 Duren Germany

Инструкция пользователя



Физиотерапевтический аппарат "воздушно-волновой лимфодренажной терапии" SLIDE-STYLER.



Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями по использованию перед запуском аппарата SLIDE-STYLER.

Компания производитель не несет ответственности за повреждения при неправильном использовании аппарата SLIDE-STYLER или при применении его не по назначению.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1 Введение	2
2.1. Панель управления аппарата Slide-Styler	2
2.2. Брюки – Манжеты	3
3 Порядок закрепления манжет	4
4 Порядок использования устройства	4
5 Перечень показаний	4
6 Комплект поставки	5
7 Технические данные	5

1. Введение

Физиотерапевтический аппарат "воздушно-волновой лимфодренажной терапии" SLIDE-STYLER представлен прибором, служащим для проведения профилактических и лечебных мероприятий, направленных на усиление оттока лимфы и венозной крови. Во время процедуры пациент располагается на кушетке.

2. Описание SLIDE-STYLER**2.1 Панель управления аппарата «SLIDE-STYLER»:**

№	Наименование Индикатора / Клавиши	Значение	Ед. измер.
1	Регулятор длительности интервала паузы между фазами создания повышенного давления	от 1 до 15 шаг 1 сек.	сек.
2	Регулятор длительности процедуры	от 5 до 60 шаг 5 мин	мин.
3	Регулятор давления в манжетах	от 20 до 120 шаг 5	мм.рт.ст. или mmHg
4	Индикация скорости работы насоса	> или >>	
5	Переключение скоростей работы насоса		
6	Старт/Стоп		
7	26 разъемов для подключения манжет		
8	Сетевой разъем с держателем предохранителей		
9	Выключатель ON/OFF аппарата		
10	Воздушное вентиляционное отверстие		
11	Заводская информационно-техническая таблица		
12	Кнопка аварийного отключения терапии		

SLIDE-STYLER

Официальный представитель
Weyergans High Care AG
в России ИП Аракелян С.М.
тел. +7(985) 966 9900
E-mail: info@asmedtrade.com

Аппарат
воздушно-волновой
лимфодренажной терапии



Gut Boisdorf
D-52355 Duren Germany

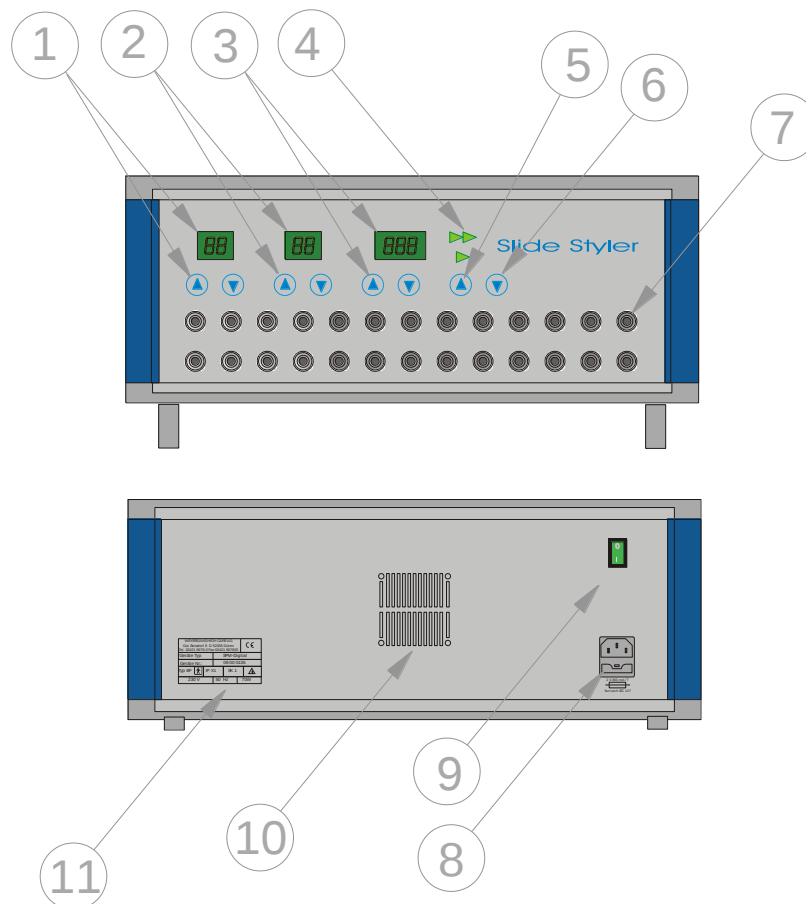


Рис. 1. Описание блока управления аппарата SLIDE-STYLER

2.2. Брюки - Манжеты

Костюм для прессотерапии SLIDE STYLER - брюки-манжеты с застежкой-молнией и перекрывающимися воздушными камерами.



3. Порядок закрепления манжет

По возможности, терапируемые части тела должны освобождаваться от одежды или (в крайнем случае) прикрываться легкой тканью. Это позволяет манжете под давлением максимально эффективно воздействовать на соответствующие области.

4. Порядок использования устройства

Установите устройство на устойчивую поверхность (температура окружающей среды не должна превышать 35°C) и переведите переключатель ON/OFF (включение/выключение) в позицию ON (включение).

Воздушное вентиляционное отверстие не должно перекрываться, поскольку это может привести к перегреву устройства.

Задайте необходимое давление для проведения лечения при помощи регулятора давления и контролируйте уровень давления при помощи дисплея.

Уровень используемого для терапии давления зависит от состояния соединительной ткани клиентов:

- слабая соединительная ткань – небольшой уровень давления;
- крепкая соединительная ткань – высокий уровень напряжения.

Продолжительность паузы (задается с помощью переключателя паузы) между соседними фазами создания повышенного давления может изменяться в диапазоне 1–10 с.

Выключатель аварийного отключения терапии служит для обеспечения безопасности и допускает отключение на определенном расстоянии от панели управления аппарата.

Пациенты должны располагаться в горизонтальном положении и по возможности полностью расслабляться в процессе терапии. При терапии руки она должна располагаться в поднятом положении.

5. Перечень показаний

1. Устройство SLIDE STYLER обеспечивает создание волнообразного массажа и может использоваться вне медицинских организаций только для массажа здоровых людей. Во всех случаях следует избегать проведения лечения при:

- наличии кожных заболеваний,
- онкологических заболеваний или воспалительных процессов,
- после недавних сердечных приступов,
- острых отеков легких,
- осложнений после ангины,
- при угрозе тромбоэмболии (процедура очищения при варикозном расширении вен) или почечной недостаточности.

При недостаточном объеме информации и возникновении каких-либо сомнений следует проконсультироваться с врачом или отменить курс лечения.

2. Продолжительность сеанса лечения с использованием устройства SLIDE STYLER составляет от 20 до 30 минут. Большие продолжительности лечения не приносят. При проведении лечения конечности должны подвергаться массажу по крайней мере два-три раза в течение недели. При лечении живота сеансы массажа должны проводиться, по возможности, ежедневно в течение всего курса лечения.

3. Лечение нижних конечностей проводится при лежащем положении пациента, Лечение области живота оказывается наиболее эффективным в тех случаях, когда спинка сидения располагается вертикально или под небольшим наклоном.

4. Первый сеанс лечения проводится при уровне давления равном 20 миллибар. Если после первого сеанса лечения появляется острая потребность в мочеиспускании, очередной сеанс лечения следует проводить при уровне давления 30 миллибар. Если после этого сеанса упомянутой потребности не появляется, уровень давления при последующем сеансе следует увеличить до 40 миллибар и т.д. Как только появляется усиленная потребность в мочеиспускании, можно продолжить использование последнего уровня давления для последующих сеансов.

5. Интенсивность воздействий (интервал/Р) может составлять от 6,5 до 10 секунд , при лечении конечностей (от 1 до 4 при лечении курящих пациентов, с учетом самочувствия и ритма выдыхания).

6. Пациентам следует в обязательном порядке советовать потреблять достаточное количество жидкости (2 – 3 л в день), в частности после возникновения сильной потребности мочеиспускания.

7. При возникновении у пациента болей в процессе или после завершения массажа или при образовании острых отеков на границах областей воздействия и подмышками лечение должно быть прекращено.

6. Комплект поставки:

	Наименование комплектующих	Кол-во
1	Аппарат SLIDE-STYLER	1
2	Кабель питания, длина 250 см	1
3	Инструкция пользователя	1
4	Костюм для прессотерапии SLIDE STYLER - брюки-манжеты с застежкой-молнией и перекрывающимися воздушными камерами.	

7. Технические данные

Характеристики	Значение
Сетевое напряжение:	230 В (V) / 50-60 Гц (Hz)
Мощность:	80 ВА (VA)
Потребляемый ток:	0,7 А
Сетевой кабель:	2,5 м
Масса	10 кг. (kg)
Габариты, Д x Ш x В	430 x 200 x 260 мм
Максимальное значение давления терапии	120 мбар (mbar)

Условия Эксплуатации:

Температура окружающей среды:	+10°C + 35°C
Относительная влажность:	20% - 80%
Класс защиты IP:	IP X1
Класс электробезопасности:	SK 1
Предохранители:	2 x 6,3 AT
Автоматический выключатель сети	16 A

Замена предохранителей



1. Переведите сетевой выключатель в положение 0.
2. Вытащите сетевой разъем из розетки
3. Вытащите держатель предохранителей, нажав пружинный язычок.
4. Удалите неисправный предохранитель и замените его исправным предохранителем с соответствующей маркировкой (1?6AT), размер 5 x 20 мм.
T- (Time-lag) - Временная задержка.



Внимание!

5. Только предохранители в соответствии с IEC 127!
6. После установки нового предохранителя установите держатель предохранителей в гнездо.
7. Подключите шнур питания.
8. Установите переключатель питания в положение. 1

Компания не несет ответственности за убытки, понесенные в связи с этим продуктом, выходящие за пределы норм немецкого права. Компания оставляет за собой право на ремонт, модификацию, замену или возмещение стоимости аппарата.