

Vacu Arm-Neck-Shoulder

Аппарат для проведения процедуры пневмомассажа
для руки, шеи, плеча.



Функции аппарата Vacu Arm-Neck-Shoulder

- Процедуры пневмомассажа при травмах руки, шеи, плеча.
- Стимуляция кровоснабжения, улучшение и восстановление микроциркуляции
- Лимфодренаж
- Восстановление эластичности мягких тканей

Эксклюзивный представитель компании Weyergans High Care AG в России
ИП Аракелян С.М.


Принцип действия аппарата Vacu Arm-Neck-Shoulder .

Действие аппарата основано на попеременном воздействии отрицательного и атмосферного давления на верхние конечности.

Этот процесс похож на действие насоса.

Данный метод бесконтактный, все происходит на уровне физики, за счет разности потенциалов давления.

Создаваемый вакуум в капсуле переносится в сосуды, артерии, вены, лимфосистему и капилляры.

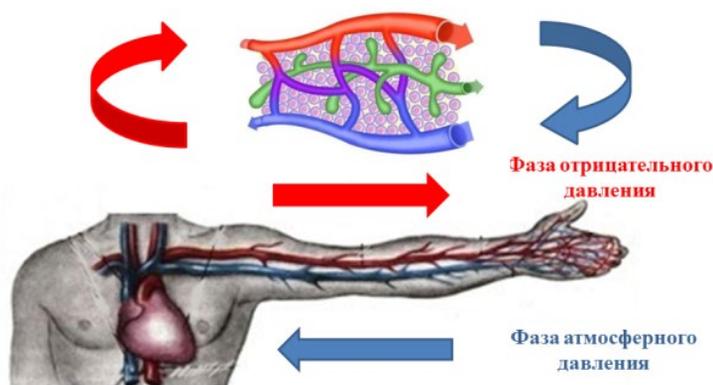

Во время фазы отрицательного давления происходит расширение сосудов и тканей, давление в этих тканях падает, что способствует обильному притоку артериальной крови в верхние конечности тела.

Во время фазы атмосферного давления венозная кровь и лимфа активнее продвигаются по капиллярам венозной и лимфатической системы, что усиливает лимфодренаж, способствует удалению продуктов метаболизма.

В фазе отрицательного давления кровеносная и лимфатическая системы одновременно насыщаются, не препятствуя друг другу, а в фазе атмосферного давления, за счет упругости ткани, происходит принудительный отток по венозной и лимфатической системе.

Эксклюзивный представитель компании Weyergans High Care AG в России
ИП Аракелян С.М.